

Gebrauchsanweisung / Istruzioni per l'uso

Vaginal-Gel / Gel Vaginale



DE Medizinprodukt

- Befeuchtungsgel bei Scheidentrockenheit
- Zur Behandlung von vaginaler Trockenheit bedingtem Brennen und Juckreiz
- Sofort-Linderung
- Mit Langzeitwirkung
- Hormonfrei

Redcare Vaginal-Gel findet Anwendung bei der Behandlung von vaginaler Trockenheit. Mit seinem speziellen Feuchtigkeitskomplex aus Hyaluronsäure und Glycerin hilft das Gel den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt wiederherzustellen. Darüber hinaus bildet es einen Film auf der Haut und schützt so vor weiteren Reizungen. Trockenheitsbedingte Schmerzen wie Brennen und Juckreiz werden somit effektiv gemindert. Redcare Vaginal-Gel ist frei von Hormonen und Konservierungsstoffen.

Anwendungsgebiet:

Gel zur Behandlung von vaginaler Trockenheit.

Anwendung:

Seife, Lotionen und parfümierte Produkte können zu einer Verschlimmerung der vaginalen Trockenheit führen. Wenden Sie daher diese Produkte nicht mehr für die vaginale Hygiene, insbesondere im Inneren der Vagina, an. Benutzen Sie den Applikator oder Ihre Finger um Redcare Vaginal-Gel zu applizieren. Waschen Sie sich vor und nach der Anwendung die Hände. Ein leicht kribbelndes Gefühl während der Applikation ist normal und verschwindet sehr schnell wieder.

Wie häufig Sie Redcare Vaginal-Gel anwenden sollten, hängt vom Schweregrad der vaginalen Trockenheit ab. Wir empfehlen die Verwendung des Gels alle drei Tage oder bei starker Trockenheit: täglich auftragen.

Nach 30 Tagen Applikation unterbrechen Sie bitte die Anwendung für 2 Tage.

Nehmen Sie die Kappe von der Tube und benutzen den Dorn auf der Oberseite der Kappe um das Siegel der Tube zu brechen.

Sie können für die Applikation des Redcare Vaginal-Gels auf den beigelegten Spezialapplikator zurückgreifen:

Zu diesem Zweck schrauben Sie den Applikator auf die Tubenspitze.

Nach Benutzung des Applikators schrauben Sie diesen ab und waschen ihn unter lauwarmen Wasser ab.

Verschließen Sie die Tube entweder wieder mit dem großen Verschlussdeckel oder im Falle des aufgesteckten Applikators mit der kleinen Verschlusskappe.

Externe Applikation:

Drücken Sie etwas Gel aus der Tube (ca. 1ml um die Fingerspitze zu bedecken) auf Ihren Zeigefinger. Tragen Sie das Gel auf die Vaginalöffnung und das umliegende Gewebe auf.

Interne Applikation:

Drücken Sie die Tube leicht bis etwas Gel an der Öffnung des Applikators erscheint. Führen Sie den Applikator ein und drücken Sie leicht auf die Tube. Die erforderliche Menge des Gels (1ml) sollte groß genug sein, um Ihre Fingerspitze zu bedecken. Üben Sie die Anwendung mit Applikator vor dem Einführen.

IT Dispositivo medico

- Gel idratante per la secchezza vaginale
- Per il trattamento del bruciore e del prurito indotti dalla secchezza vaginale
- Solievo immediato
- Con effetto a lungo termine
- Senza ormoni

Redcare Gel Vaginale è usato per il trattamento della secchezza vaginale. Grazie allo speciale complesso idratante di acido ialuronico e glicerina, il gel aiuta a ripristinare il naturale equilibrio di idratazione. Inoltre, forma una pellicola sulla pelle proteggendola quindi da ulteriori irritazioni. I dolori legati alla secchezza, come il bruciore e il prurito, vengono così efficacemente ridotti. Redcare Gel Vaginale è privo di ormoni e conservanti.

Indicazione terapeutica:

Gel per il trattamento della secchezza vaginale.

Modo d'uso:

Sapone, lozioni e prodotti profumati possono peggiorare la secchezza vaginale. Pertanto, smettete di usare questi prodotti per l'igiene vaginale, soprattutto all'interno della vagina.

Utilizzare l'applicatore o le dita per applicare Redcare Gel Vaginale. Lavarsi le mani prima e dopo l'uso.

Una leggera sensazione di formicolio durante l'applicazione è normale e scompare molto rapidamente.

La frequenza di utilizzo di Redcare Gel Vaginale dipende dalla gravità della secchezza vaginale. Si consiglia di utilizzare il gel ogni tre giorni o, in caso di forte secchezza, di applicarlo quotidianamente.

Dopo 30 giorni di applicazione, interrompere l'uso per 2 giorni.

Rimuovere il tappo dal tubetto e utilizzare la punta della parte superiore del tappo per rompere il sigillo del tubetto.

Per applicare il gel vaginale Redcare si può utilizzare l'apposito applicatore in dotazione:

A tal fine, avvitare l'applicatore sulla punta del tubetto.

Dopo aver utilizzato l'applicatore, svitarlo e lavarlo sotto acqua tiepida.

Richiudere il tubetto con il tappo grande o, nel caso dell'applicatore in dotazione, con il tappo piccolo.

Applicazione esterna:

Spremere un po' di gel dal tubetto (circa 1ml per coprire il polpastrello) sul dito indice. Applicare il gel sull'apertura vaginale e sul tessuto circostante.

Applicazione interna:

Spremere delicatamente il tubetto finché non compare un po' di gel all'apertura dell'applicatore. Inserire l'applicatore e premere leggermente sul tubetto. La quantità di gel necessaria (1ml) deve essere sufficiente a coprire il polpastrello. Esercitarsi a usare l'applicatore prima dell'inserimento.

Aktive Inhaltsstoffe:

Hyaluronsäure, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum, Pullulan.

Aufbewahrung

Das Gel sollte an einem sicheren und trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

Das Gel nicht nach Ablauf des oben an der Tube und auf der Packung angegebenen Verfalldatums verwenden.

Sicherheitshinweise:

Das Gel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei Fragen oder Unklarheiten zu dem Produkt fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Bei anhaltenden und wiederkehrenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Hinweise:

Redcare Vaginal-Gel ist geruchslos und enthält keine Konservierungsstoffe, Hormone, Silikone oder tierische Bestandteile. Die funktionalen Inhaltsstoffe sind Hyaluronsäure, Glycerol, Betain, Xanthan Gummi und Pullulan. Diese Inhaltsstoffe dienen der Befeuchtung der vaginalen Mucosa.

Das Gel ist wasserlöslich, fettet nicht und hinterlässt keine Flecken.

Redcare Vaginal-Gel hat keine bekannten Nebenwirkungen und kann parallel mit anderen Medikationen verwendet werden.

Allergische Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sind selten.

Im Zweifel sollte etwas Gel auf der Innenseite des Unterarms aufgebracht und die Stelle eine Zeit lang beobachtet werden. Wenn sich nach der Behandlung eine juckende und gerötete Hautreaktion offenbart, sollte das Redcare Vaginal-Gel nicht verwendet werden.

Inhalt: 30ml Tube mit Redcare Vaginal-Gel, Beipackzettel, Applikator

Principi attivi:

Acido ialuronico, glicerina, betaina, gomma xantana, pullulano.

Conservazione

Il gel deve essere conservato in un luogo sicuro e asciutto a temperatura ambiente.

Non utilizzare il gel dopo la data di scadenza indicata nella parte superiore del tubetto e sulla confezione.

Istruzioni di sicurezza:

Tenere il gel fuori dalla portata dei bambini.

In caso di domande o dubbi sul prodotto, rivolgersi al proprio medico e al farmacista.

In caso di disturbi persistenti o ricorrenti, consultare il medico.

Indicazioni:

Redcare Gel Vaginale è inodore e non contiene conservanti, ormoni, siliconi o ingredienti di origine animale. Gli ingredienti funzionali sono acido ialuronico, glicerolo, betaina, gomma xantana e pullulano.

Questi ingredienti servono a idratare la mucosa vaginale.

Il gel è solubile in acqua, non unge e non lascia macchie.

Redcare Gel Vaginale non ha effetti collaterali noti e può essere utilizzato in parallelo con altri medicinali. Le reazioni allergiche a uno degli ingredienti sono rare. In caso di dubbio, applicare un po' di gel all'interno dell'avambraccio e osservare la zona per un poco. Se dopo il trattamento compare una reazione cutanea pruriginosa e arrossata, Redcare Gel Vaginale non deve essere utilizzato.

Contenuto: Tubetto da 30ml con Redcare Gel Vaginale, Inserto della confezione, Applicatore



Auf Boden der Faltschachtel aufgedruckt und in Tubenfalz



Bei Raumtemperatur aufbewahren



Gebrauchsanweisung beachten



Medizinprodukt



Hersteller:

TheOTCLab B.V.
Fred. Roeskestraat 115
1076 ED Amsterdam, Niederlande



0482



Vertrieb:

Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum, Niederlande



Stampato sul fondo della scatola pieghevole e nelle pieghe del tubetto



Conservare a temperatura ambiente



Consultare le istruzioni per l'uso




Dispositivo medico



Produttore:

TheOTCLab B.V.
Fred. Roeskestraat 115
1076 ED Amsterdam, Paesi Bassi

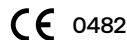

0482



Distribuzione:

Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum, Paesi Bassi

Stand der Information: April 2024

e30ml

Stato dell'informazione: aprile 2024

72748037/24D1 408_REV02 G03 180004499 220542601013