



TRED[®]medical

QUALITÀ
A COSTI
SOSTENIBILI

Il valore della nostra offerta

PRONTURINA



Sistema per la raccolta delle urine dei più piccoli.

Facile da usare, senza stress per bimbo e mamma.

- 1 Raccolta delle urine in provetta**, mediante spremitura del tampone contenuto nella confezione.
- 2 Il campione può essere usato per test rapido** con strisce reagenti o per esami chimico-fisici.
- 3 Metodo validato da un lavoro scientifico.** "Valutazione comparativa dell'analisi biochimica e microbiologica dell'urina raccolta convenzionalmente e con un nuovo metodo" Microbiologia Medica, volume 20, numero 1, 2005.
- 4 Il kit Pronturina contiene 2 patch** assorbenti anatomici, a triplo filtrante, ipoallergenici validati per catturare e liberare l'urina senza interferire sugli sviluppi diagnostici, 1 siringa per spremitura ed 1 provetta con tappo.

Come si usa: 5 SEMPLICI PASSI

- 1** Pulire l'area genitale del bambino utilizzando un sapone neutro.
- 2** Aprire uno dei patch, rimuovere la striscia proteggi adesivo e sistemarla sul pannolino.
- 3** Quando il bambino ha fatto la pipì, controllare che non ci siano feci. In assenza di feci, rimuovere il patch dal pannolino.
- 4** Prendere la siringa contenuta in Pronturina, rimuovere il pistone e introdurre il patch arrotolato, con la parte adesiva all'esterno, all'interno della siringa.
- 5** Prendere la provetta contenuta in Pronturina e introdurre il beccuccio terminale della siringa al suo interno. Premere lo stantuffo, riempire la provetta e chiuderla.

Pronturina è un metodo semplice e affidabile, che permette di ottenere un campione di urine, utilizzabile sia per effettuare il test rapido con strisce reagenti, sia i test chimico fisici di laboratorio.

A DISPOSIZIONE SU WWW.TREDMEDICAL.COM LE INDICAZIONI DETTAGLIATE E LE VIDEO ISTRUZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DEL PRODOTTO

www.tredmedical.com/pronturina-video

TRED SRL

Via E. De Amicis, 53 - 20152 Milano - Sede Legale e Amministrativa
telefono 02 581 189 27 - fax 02 581 099 88
customer@tredmedical.com

UFFICI DIREZIONALI E SERVIZI LOGISTICI

Via della Tecnica, 25 - 60015 Falconara Marittima (AN)
telefono 071 097 0558 - fax 071 920 8805
info@tredmedical.com