

super **Orasiv**

Polvere Adesiva per Dentiere

ORASIV SUPER POLVERE ADESIVA fissa ogni tipo di protesi (completa, parziale, provvisoria) creando un forte legame con la gengiva.

E' disponibile nei formati da 30 g, 50 g e 125 g.

MODALITA' D'USO

- 1) Pulire accuratamente la dentiera e risciacquare abbondantemente con acqua corrente.
- 2) Togliere l'eccesso di acqua dalla protesi avendo cura di mantenerla umida.
- 3) Spargere uno strato sottile e uniforme di polvere adesiva sulle superfici della protesi che andranno in contatto con palato e gengive.
- 4) Posizionare la protesi in bocca e premere per alcuni secondi.

POSOLOGIA

Applicare da 1 a 3 volte al giorno.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso uno o più componenti.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO

La durata del potere adesivo di ORASIV SUPER POLVERE ADESIVA può variare a seconda delle caratteristiche fisiche personali (salivazione, anatomia della bocca, stato generale di salute, età). Prima di ogni applicazione, pulire accuratamente la protesi, rimuovendo eventuali residui di prodotto e di cibo. Dopo ogni applicazione, chiudere bene il tappo del flacone. Non usare in caso di lesioni alla mucosa. Non ingerire. Non utilizzare se il confezionamento risulta aperto o danneggiato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSIGLI PRATICI

Fare controllare regolarmente dal dentista l'adattamento della protesi al proprio cavo orale e seguire i suoi consigli. Mangiare a piccoli morsi e masticare lentamente.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Ingredienti: Gomma Acacia, Gomma Karaya, Sodio Tetraborato, Carbonato di Sodio, Bicarbonato di Sodio, Menta Selecta.

REF 03146 11/2012



Bouty, an IBSA Company

BOUTY S.p.A.
Via Vanvitelli, 4
20129 Milano
info.consumatori@bouty.it



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso