


Mepore®

Medicazione assorbente autoadesiva

Pellicola protettiva,
facilmente
removibile

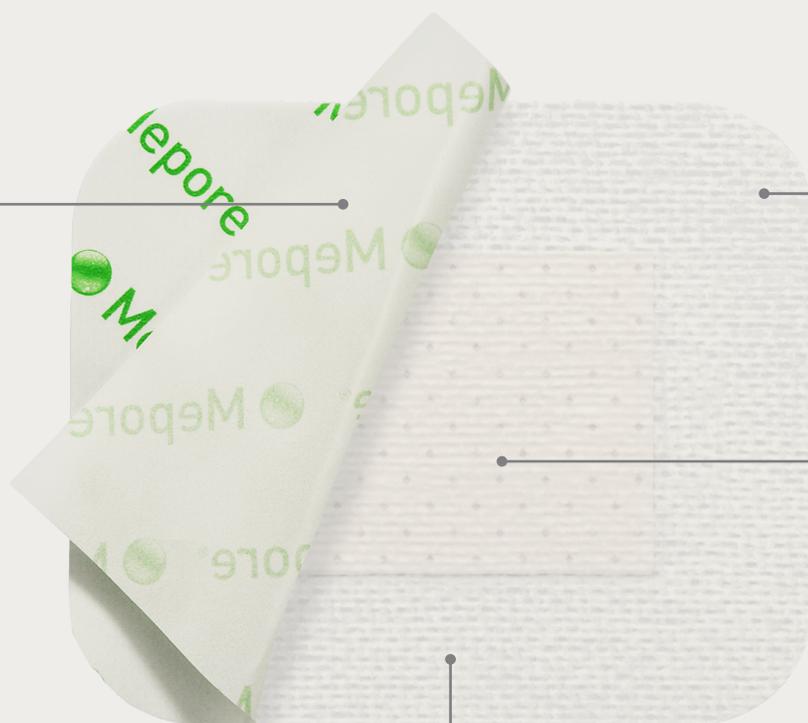

Supporto in tessuto non
tessuto morbido, elastico
ed altamente traspirante
per un migliore comfort
del paziente

Tampone assorbente con
strato di contatto a bassa
aderenza per un migliore
comfort del paziente e un
tempo di usura più lungo

Adesivo a base acquosa, privo di
solventi, per un fissaggio sicuro e
delicato sulla cute

Mepore® é una medicazione adesiva, traspirante, ideale per ferite da poco a moderatamente essudanti. L'adesivo in poliacrilato, a base acquosa e privo di solventi garantisce un fissaggio sicuro e delicato.

Come si usa Mepore®



1. Aprire la confezione ed estrarre la medicazione.



2. Posizionare la medicazione sulla pelle senza tenderla e rimuovere delicatamente le pellicole protettive.



3. Togliere la pellicola protettiva rimanente e far aderire Mepore alla cute, esercitando una leggera pressione sui bordi. Non tendere la medicazione durante l'applicazione.

Come funziona Mepore®

La struttura porosa del tessuto non tessuto assicura la permeabilità all'aria e al vapore acqueo. Il tessuto è flessibile, si adatta bene ai contorni del corpo e consente movimenti del corpo quando è in posizione. Il tessuto non è assorbente e fornisce una barriera per il sangue e fluidi.

L'adesivo in poliacrilato è stato progettato per essere delicato sulla pelle e allo stesso tempo fornire un fissaggio sicuro. Il cuscinetto per ferita è in grado di assorbire quantità moderate di liquido per ferite e lo strato di contatto della ferita a bassa aderenza riduce il rischio di aderenza alla ferita. La pellicola protettiva facile da rimuovere consente un'applicazione sterile e semplifica l'applicazione della medicazione.

Benefici di Mepore

- Adesivo a base d'acqua, delicato sulla cute
- Lo strato a contatto con la ferita a bassa aderenza riduce al minimo il rischio di aderenza alla ferita
- Supporto flessibile idrorepellente
- La carta protettiva facilmente rimovibile consente un'applicazione comoda e asettica
- Permeabile all'aria, impedisce la macerazione e offre un maggiore comfort
- Angoli arrotondati per un fissaggio sicuro (tutte le dimensioni fino a 9x15 cm)

Aree di utilizzo

Mepore® può essere utilizzato in un'ampia varietà di ferite da basso a moderatamente essudanti. Questi includono ferite chirurgiche, lievi ustioni, tagli e abrasioni.

Frequenza del cambiamento

La frequenza del cambio di medicazione varia in base alle condizioni della ferita. Per rimuovere la medicazione sollevare il bordo adesivo e tirare delicatamente nella direzione di crescita dei peli.

Per saperne di più visita il sito www.molnlycke.it

Molnlycke Health Care Srl, Via Marsala, 40/C Gallarate VA, Italia, Tel +39 0331 714011. I marchi commerciali, i nomi e i loghi Molnlycke, Exufiber, Mepilex, Safetac e Hydrolock sono registrati a livello globale a nome di una o più società del Gruppo Molnlycke Health Care © 2019 Molnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. ITWC03301912

Precauzioni

Non tendere Mepore durante l'applicazione, soprattutto se posizionata su articolazioni, per evitare di causare danni alla cute.

Assortimento Mepore (sterile in confezioni singole)

Codice	Formato (cm)	Dimensioni ferita (cm)	Pezzi Dispenser	Pezzi TRP
670800	6 x 7	3 x 4	60	480
670900	9 x 10	4.5 x 6	50	400
671000	9 x 15	4.5 x 10	50	400
671100	9 x 20	4.5 x 15	30	180
671200	9 x 25	4.5 x 20	30	180
671300	9 x 30	4.5 x 25	30	270
671400	9 x 35	4.5 x 30	30	180

Assortimento Mepore Roll non sterile da 5 metri

Codice	Larghezza (cm)	Larghezza cuscinetto	Medicazioni per TRP
Rotoli da 5 metri			
331900	4	1.5	24
332000	7	3	18