



20 Garze Oftalmiche Monouso per l'igiene quotidiana dell'area perioculare dell'adulto e del bambino

MEDICAL DEVICE

Garze Oftalmiche Monouso di cotone naturale al 100% imbevute di soluzione isotonica oftalmica a base di Acido ialuronico, Aloe Vera e Camomilla, ad azione delicatamente detergente, idratante, emolliente e lenitiva della zona palpebrale

INDICAZIONI

Indicate per l'igiene quotidiana dell'area perioculare.

Ideali in presenza di desquamazione cutanea, conseguente a fenomeni infiammatori e/o allergici delle palpebre e come coadiuvante nella cura di alcune patologie oftalmiche, quali blefariti e blefarocongiuntiviti.

Utili, grazie alla loro delicata azione detergente, per la rimozione dei residui di prodotti cosmetici dalle palpebre e dalle ciglia. I componenti naturali di **VISUNET™**, in caso di contatto con il film lacrimale, ne rispettano il pH fisiologico. Possono essere utilizzate anche da portatori di lenti a contatto.

L'Acido ialuronico e l'Aloe Vera possiedono un'azione emolliente, idratante e lenitiva, in grado di rispettare la delicata fisiologia della cute palpebrale. L'acqua distillata di Camomilla possiede un'azione lenitiva e calmante.

Queste sostanze rendono **VISUNET™** particolarmente indicate per pelli delicate e sensibili.

CONFEZIONE

20 Garze monouso

COMPOSIZIONE

Garza 100% cotone imbevuta di soluzione detergente isotonica oftalmica (tamponata a pH 7,20) a base di Acido ialuronico 0,25%, Aloe Vera e acqua distillata di Camomilla.

SENZA Alcool, SENZA Parabeni

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavarsi accuratamente le mani.
- Aprire la bustina partendo dall'invito di taglio pre-inciso.
- Estrarre la garza, aprirla in tutta la sua estensione, massaggiare delicatamente la cute palpebrale, detergendo le ciglia e il bordo libero palpebrale, assicurando, così, una corretta igiene di tutta l'area perioculare.

In presenza di secrezione e di eventuali, persistenti residui di prodotti cosmetici sulle palpebre e sulle ciglia è preferibile ammorbidirli prima di rimuoverli, esercitando delicati movimenti verso l'esterno; oppure e' possibile scaldare la bustina chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40°C) utilizzando la garza come impacco caldo.

E' altresì possibile utilizzare la garza come impacco freddo, in caso di flogosi perioculare, facendo raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per qualche minuto e applicando successivamente la garza sulle palpebre chiuse.

AVVERTENZE

VISUNET™ garze è un Dispositivo Medico Monouso.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Ogni garza è imbevuta di soluzione isotonica oftalmica e confezionata in ambiente a contaminazione controllata.

Non utilizzare le garze dopo la data di scadenza o in caso la bustina non sia perfettamente integra.

Non riutilizzare mai la stessa garza, ma gettarla subito dopo l'uso.

Non utilizzare la stessa garza per entrambe le aree perioculari, ma usare sempre una garza nuova ad ogni applicazione.

Sospendere il trattamento in caso di una nota ipersensibilità ad uno dei componenti del prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore.

Seguire attentamente le istruzioni del Medico Oculista.

USO ESTERNO



Dispositivo Medico Monouso



 **OMISAN farmaceutici** – Via Tossicia, 15 – 00131 Roma

Distributore esclusivo

VISUFARMA SPA – Via Canino, 21 – 00191 Roma