

SPIDIDOL CARE

Spididol Care è un cerotto indicato come protettivo delle aree del corpo affette da **dolori muscolari, articolari e contratture di varia natura** (dolori reumatici, traumi sportivi, torcicollo e lombalgie). Il cerotto contiene **estratti naturali quali Arnica, Artiglio del Diavolo, Spirea, Salice, Ippocastano, Ribes ed oli essenziali quali Achillea, Zenzero, Pino Mugo, Menta Piperita, Lavanda e Rosmarino**, sostanze ad azione emolliente, eudermica, antiossidante e lenitiva che rendono meno fastidiosa la rimozione del cerotto ed evitano spiacevoli irritazioni.

Formulato per ridurre al minimo i rischi di allergie e fenomeni irritativi. Grazie all'**innovativa formula liposomiale**, Spidol Care favorisce un **rapido sollievo al dolore che persiste per 24 ore**.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di applicare il cerotto, pulire ed asciugare con cura la parte da proteggere. Staccare il cerotto dalla carta protettiva e applicarlo facendo attenzione che la parte da proteggere si trovi al centro.. Lasciare agire il cerotto per 24 ore, dopodiché sostituirlo con uno nuovo. Non utilizzare per più di 5 giorni consecutivi; se il dolore persiste consultare il proprio medico.

1. APRIRE LA BUSTA ESTRAENDO IL CEROTTO
2. RIMUOVERE LA PELLICOLA TRASPARENTE DI PROTEZIONE
3. APPLICARE IL CEROTTO SULLA PARTE INTERESSATA FACENDO ADERIRE BENE

Il prodotto dona una piacevole sensazione di tonicità e benessere all'epidermide.

È possibile tagliare il cerotto con le forbici in caso fosse necessario un formato più piccolo.

Contiene ingredienti naturali senza coloranti, conservanti. Non macchia, non unge.

AVVERTENZE

Dispositivo medico monouso. Uso esterno. Applicare sulla cute integra, pulita e asciutta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere le istruzioni per l'uso. Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 12 anni e in caso di accertata sensibilità ad uno degli ingredienti. Non utilizzare più di un cerotto contemporaneamente.

Si consiglia di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e l'allattamento. In ogni caso consultare il proprio medico.

Test clinici non hanno evidenziato problemi di tollerabilità. Leggeri arrossamenti che potessero presentarsi scompaiono normalmente poche ore dopo la rimozione del cerotto. Qualora la reazione persista sospendere il trattamento e consultare il proprio medico.

La funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantite dall'integrità della busta. Non utilizzare nel caso la busta sia rotta o bucata.

LA QUALITÀ DEL TESSUTO GARANTISCE ELASTICITÀ E UNA PERFETTA ADESIVITÀ CHE LO RENDE PERFETTAMENTE ADATTABILE ANCHE ALLE ZONE PIÙ DIFFICILI (ARTICOLAZIONI).

Fabbricante : Apharm Srl, Via Roma, 26 28041 Arona (NO) - Italia
Distributore: Zambon Italia Srl, Via Lillo del Duca, 10
20091 Bresso (MI) - Italia



Zambon

		Property of Zambon S.p.A Via Lillo del Duca 10 20091 Bresso / Milano		PRODOTTO / BRAND: IS SPIDIDOL CARE - ITALIA	LATO STAMPA BIANCA/VOLTA (SIDE PRINT FRONT/REAR): N/A
CODICE / ITEM: XXXXXX		DATA / DATE: 26/01/2017		REV MOCKUP APPROVATO - DATA: N/A	ARTWORK REV: REV1
DIMENSIONI / SIZE: 100x150mm		FORM./TECH.CODE/MASTER LAYOUT: N/A		CONFORME AL MASTER LAYOUT - NOTE: N/A	
COD. CLIENTE / CUSTOMER CODE: N/A		PHARMA CODE: N/A		COLORI / COLORS NO: 1	
STABILIMENTO / PLANT: N/A		PACKAGING LINE: N/A		<input type="checkbox"/> P 425 C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
CHANGE DESCRIPTION: NUOVA GRAFICA / NEW CORPORATE BRAND				FONT/CORPO MIN./INTERLINEA (FONT/MIN. SIZE/SPACING): HELVETICA NEUE Corpo 8,5pt. - Interlinea 11pt. ISTRUZIONI FORNITORE / SUPPLIER INSTRUCTION: N/A	