



Informazioni sul prodotto

L'epitelio vaginale è morbido ed elastico grazie ad un delicato equilibrio che mantiene il giusto livello di idratazione e lubrificazione. In alcune fasi della vita (dopo il parto, durante l'allattamento, in menopausa), a seguito di certe terapie farmacologiche (contraccettivi orali), od in periodi di particolare stress questo delicato equilibrio viene alterato, inducendo uno stato di sofferenza, caratterizzato da secchezza vaginale, bruciore ed irritazione. Il bruciore e l'irritazione, spesso associati a microlesioni dell'epitelio, sono causati dall'attrito provocato dalla mancata lubrificazione. In questi casi, accanto ad un eventuale trattamento farmacologico specifico, è indicato l'utilizzo locale di un prodotto in grado di favorire l'idratazione della mucosa contribuendo a restituirle la naturale elasticità e morbidezza.

HYALO GYN® è un gel incolore con elevate proprietà idratanti che contiene Hydeal-D®, un estere dell'acido ialuronico. L'acido ialuronico è una molecola responsabile del mantenimento del corretto livello di idratazione dei tessuti, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riparazione. La formulazione a base di Hydeal-D® offre una ottimale adesione alla mucosa vaginale, una prolungata azione idratante e favorisce i naturali processi di guarigione delle microlesioni causate dall'attrito. La formulazione non contiene né parabeni né conservanti.

Composizione

Componente principale: Hydeal-D® 0,2% (un estere dell'acido ialuronico).

Altri componenti: propilen glicole, metilpropanediolo, carbomer, 1,2-Esandiolo, Caprilil glicole, sodio idrossido, acqua depurata.

Indicazioni

Gel complementare al trattamento della secchezza vaginale di varia natura; coadiuvante del naturale processo di guarigione delle microlesioni da attrito della mucosa vaginale.

Modalità d'uso

1. Avvitare l'applicatore all'imboccatura del tubo.
2. Spremere il tubo e riempire l'applicatore fino a quando il pistoncino non si ferma.
3. Svitare l'applicatore dal tubo e, dopo aver provveduto ad un'adequata igiene intima, inserire l'applicatore nella cavità vaginale, stando in posizione seduta o distesa sulla schiena.
4. Spingere lo stantuffo fino a provocare la fuoriuscita di tutto il gel.
5. Eliminare l'applicatore dopo l'uso.
6. In caso di secchezza molto pronunciata è opportuno far fuoriuscire una piccola quantità di gel dalla cannula e lubrificare quest'ultima prima della sua introduzione.

Frequenza di applicazione

La frequenza di applicazione dipende dalle condizioni di secchezza della mucosa vaginale. Si raccomanda una applicazione ogni tre giorni per un periodo di trenta giorni, salvo diverso parere del Medico. Non è necessario interrompere il trattamento durante il flusso mestruale.

Controindicazioni

Ipersensibilità individuale accertata al prodotto.

Precauzioni ed avvertenze

In caso di infezione vaginale l'uso del prodotto è a discrezione del Medico.

Il prodotto non influenza eventuali indagini ginecologiche.

Il prodotto può essere usato con i profilattici in lattice lubrificati, non lubrificati e in polisoprene.

Il prodotto non può essere usato con i profilattici in poliuretano.

Non usare contemporaneamente disinfettanti vaginali a base di sali di ammonio quaternario, come il benzalconio cloruro, che possono alterare l'acido ialuronico.

Gli applicatori sono monouso e devono essere gettati dopo l'uso. Se vengono riutilizzati, Fidia Farmaceutici non può rispondere delle prestazioni, della funzionalità, o della pulizia.

Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata in modo tale da compromettere l'integrità del tubo.

Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Effetti Indesiderati

Durante l'uso di prodotti per il trattamento della secchezza vaginale possono presentarsi perdite biancastre e inodori.

Conservazione

Conservare a temperatura non superiore a 30°C. Non congelare.

Confezione

Astuccio contenente un tubo da 30g di gel e una busta sigillata con 10 applicatori monouso.

Fabbricante

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme (PD) - ITALY



Data dell'ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Novembre 2015

679703



Leggere le
istruzioni d'uso



Data di
scadenza



Numero
di lotto



Non usare se
la confezione
è danneggiata



Temperatura
di conservazione



Fabbricante



Non riutare