

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
• FAC SIMILE •



Soluzione 0,3%
Gocce oculari

**per lubrificare
e idratare a lungo**

Con **ACIDO IALURONICO**
Applicabile con **LENTI A CONTATTO**

20 AMPOLLINE STERILI MONODOSE DA 0,35 ml
SENZA CONSERVANTI

Octilia Lacrima Gocce Oculari è una soluzione isotonica tamponata e sterile, contenente Acido ialuronico sale sodico.

La soluzione è indicata ad essere instillata in gocce quale sostituto lacrimale, per la protezione corneale.

Dà sollievo dopo stress meccanico dovuto all'uso di lenti a contatto.

Confezione: 20 fiale da 0,35 ml. Soluzione 0,3%.

Indicazioni: **Octilia Lacrima Gocce Oculari** protegge, umidifica e lubrifica la superficie oculare procurando sollievo prolungato ai disturbi causati da assenza di lubrificazione corneo-congiuntivale, come secchezza, senso di corpo estraneo, dopo stress meccanici provocati dall'uso prolungato di lenti a contatto, quando lo strato lipidico è ridotto o alterato.

Composizione: Acido ialuronico sale sodico, potassio fosfato monobasico, sodio cloruro, sodio idrato, sodio edetato, potassio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Avvertenze: Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
Non conservare al di sopra dei 25°C e tenere lontano da fonti di calore e dalla

portata dei bambini. Non ingerire.
Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti.
In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico.
Non usare la fiala se danneggiata.

Istruzioni per l'uso: Dopo aver lavato bene le mani con il sapone, aprire la fiala secondo la figura a fianco e instillare nel sacco lacrimale una o due gocce per occhio.

La fiala è monouso ed è sufficiente per una sola applicazione.



Posologia: Una o due gocce nel sacco lacrimale due o tre volte al giorno, oppure secondo prescrizione medica.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Ocilia Lacrima Gocce Oculari è un dispositivo medico di Classe IIa.



GENETIC SpA
Contrada Canfora, Nucleo Industriale
84084 - Fisciano (SA) ITALIA

CE 0373
DISPOSITIVO MEDICO

STERILE A



Distribuito da:
Bouty S.p.A.
Via Vanvitelli, 4 - 20129 Milano
info.consumatori@bouty.it





**Soluzione 0,3%
Gocce oculari**

**per lubrificare
e idratare a lungo**

Con **ACIDO IALURONICO**
Applicabile con **LENTI A CONTATTO**

FLACONE DA 10 ml

Octilia Lacrima Gocce Oculari è una soluzione isotonica tamponata e sterile, contenente Acido ialuronico sale sodico.

La soluzione è indicata ad essere instillata in gocce quale sostituto lacrimale, per la protezione corneale.

Dà sollievo dopo stress meccanico dovuto all'uso di lenti a contatto.

Confezione: Flacone pluridose da 10 ml. Soluzione 0,3%.

Indicazioni: **Octilia Lacrima Gocce Oculari** protegge, umidifica e lubrifica la superficie oculare procurando sollievo prolungato ai disturbi causati da assenza di lubrificazione corneo-congiuntivale, come secchezza, senso di corpo estraneo, dopo stress meccanici provocati dall'uso prolungato di lenti a contatto, quando lo strato lipidico è ridotto o alterato.

Composizione: Acido ialuronico sale sodico, potassio fosfato monobasico, sodio cloruro, sodio idrato, sodio edetato, potassio cloruro, N-idrossimetil glicinato, acqua per preparazioni iniettabili.

Avvertenze: Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Non conservare al di sopra dei 25°C e tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Non ingerire.

Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti.

In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico.

Non usare il flacone se danneggiato.

Istruzioni per l'uso: Dopo aver lavato bene le mani con il sapone, aprire il flacone e instillare nel sacco lacrimale una o due gocce per occhio.

Posologia: Una o due gocce nel sacco lacrimale due o tre volte al giorno, oppure secondo prescrizione medica.

Utilizzare il prodotto entro 30 giorni dalla data di apertura del flacone.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Octilia Lacrima Gocce Oculari è un dispositivo medico di Classe IIa.



GENETIC SpA
Contrada Canfora, Nucleo Industriale
84084 - Fisciano (SA) ITALIA



Distribuito da:
Bouty S.p.A.
Via Vanvitelli, 4 - 20129 Milano
info.consumatori@bouty.it



CE 0373
DISPOSITIVO MEDICO